

# SUM3D DENTAL インストール手順 (Ver 10. Feb. 2010)

By U.I.Technology



必ず **Administrator** 権限でログインしてください。

DVD(4G/8倍速)の読めるPCにインストールしてください。


## ① DENTALのインストール (以下のファイルは全てDVD中の¥DENTAL¥内にあります)

PCにSUM3DDVDをセットします。DVD中の¥DENTAL¥ setup.exeをマウスのダブルクリックで実行します。と次のどちらかの画面がでます。

(インストールのバージョンにより異なる画面が出る場合もありますが、基本的な操作は一緒です。)

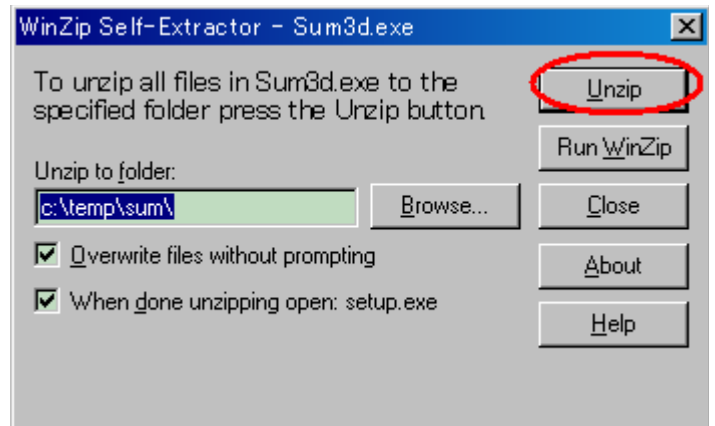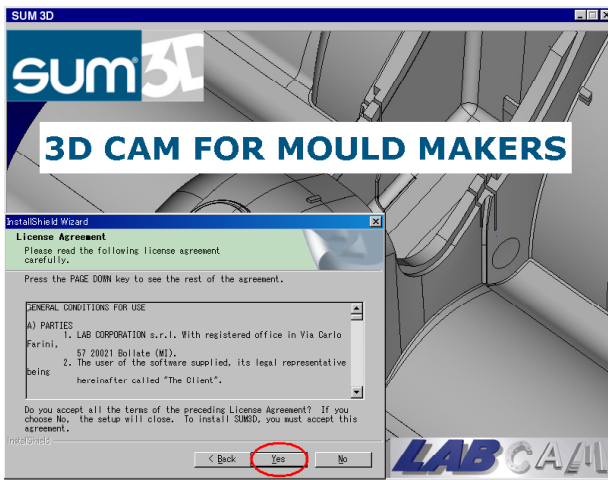

以前にSUM3Dがインストールされている場合この画面がでますのでSUM3DをRemove(削除)した後再度①からインストールしてください。

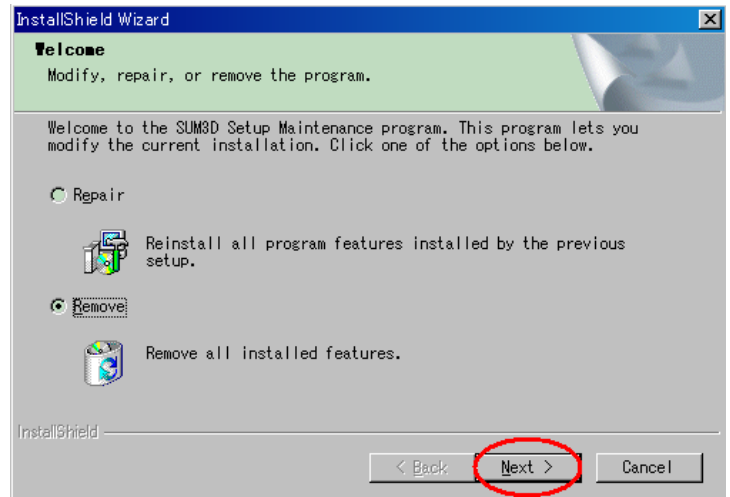

インストール・ウィザードが表示されますので、指示に従ってください。

すべてYesまたはNEXTを選択して先に進んで下さい。約5分程かかります。

インストールが完了しましたら再起動をして下さい。

**注意:** C: ¥SUMのフォルダー内は読み取り専用のチェックを外して下さい (読み書き可能にする)

SUM3D DENTALはこれで終了です。

ライセンス・ dongleをセットすればSUM3Dが使用可能になります。仮ライセンスを申請の場合③に飛んでください。



### ③ 仮ライセンスの取得

デスクトップに表示されている SUM3D のアイコンをクリックして下さい。  
ライセンス用の dongle がセットされている場合はこれで使用が可能です。



ライセンス用の dongle がセットされていない場合次の表示があります。全英語表示の場合もあります。

7 Days を押して下さい

通常これでインストールした日から7日間の使用が可能になります。

もう少しお使いになりたい場合30日間の仮ライセンスを発行いたします。

「ライセンス要求書」をクリックして下さい。

Request License



この INSTALLATION CODE というのはこの PC で発生する固有のコードです。

必要事項を記入の上 Email か FAX にて **UIT** または **CIMSYSTEM** 社にお送りください。

3日程度で**仮使用コード**をお送りいたします。

Please fill in request form giving following  
INSTALLATION CODE :

D9BC AA91 DD46 100E 43 00

Send it to e\_mail address: support@cimssystem.com  
or fax it to: +39 - 02 - 61.866.313

TEMPORARY KEY request form 仮使用コード(30日間)要求

英数半角にて記入をお願いします

INSTALLATION CODE : D9BC AA91 DD46 100E 43 00  
PC発生固有コード

Company :  
会社名

Usr. name :  
使用者名

Address :  
住所

印刷 保存 終了





#### ④ 仮ライセンスのセット

仮ライセンスコードが送られてきましたら、  
**SUM3D**をRUNして下さい。

コード挿入をクリックして、送られて来ました仮使用コードを  
コピー入力して下さい。

インサートを押してから終了してください。  
これで30日間の使用が可能になります。  
(インストールした日からではなくライセンスの発行日  
からのカウントになります)

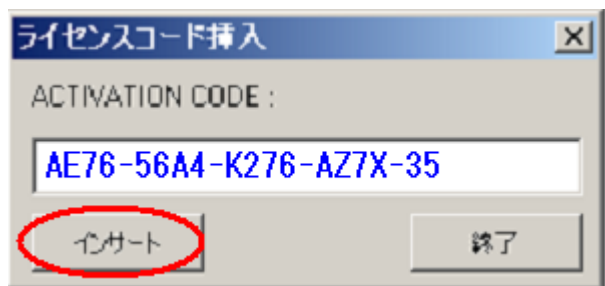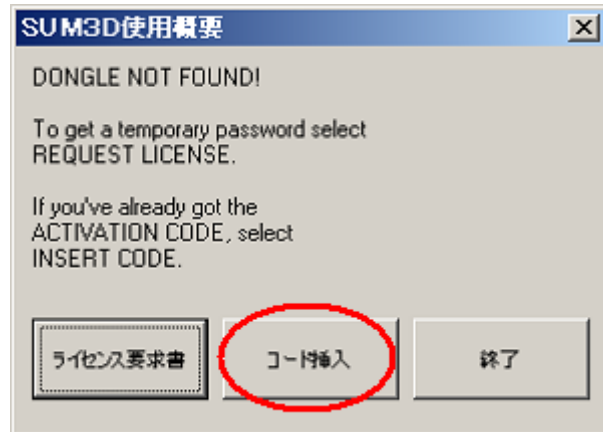

#### ⑤ USB dongleのインストール

当社の提供するUSB dongleは Windows (2000/XP/Vista)での認識がされない可能性があります。  
**Driver-dongle.exe** を実行して下さい。(自動的にインストールします)  
ドライバーはインストールDVD内の ¥Usb\_Inst フォルダにあります。  
なお、USB dongleのインストールはSUM3Dのインストールの前でも後でもかまいません。

#### ⑥ その他

DVD中に**SUM3D**に関する操作・説明のPDFファイル、TXTファイルがあります。ぜひ御覧下さい。

本ソフトの御使用にあたりインストールDVD内のマニュアルに記載の使用契約に同意されたものといたします。  
仮使用コードをお使いの方には宜しく御評価下さいます様お願いいたします。また御下命下さいますようお待ちしております。  
正規ライセンスdongleの貸出しもしております。御問合せ下さい。



**SUM3D**日本総代理店

**U. I. Technology Co. Ltd.**

函館本社 函館市堀川町 10-14

Tel 050-7513-2621

名古屋営業所 愛知県碧南市相生町 1-58

Tel 0566-42-4373

Email

[uit@u-i-technology.com](mailto:uit@u-i-technology.com)

HomePage

<http://www.u-i-technology.com>