

必ず **Administrator** 権限でログインしてください。

## インストール

PCに **Dental Shaper 評価版**インストールDVD(又はCD)をセットします。

(バージョンにより異なる画面が出る場合もありますが、基本的な操作は一緒です。)

### ① ライノセラス 4.0 ④のインストール

¥**ライノセラス ④評価版**のフォルダー内に **rh40eval\_ja\_20100401.exe** がありますので、これをクリックして実行して下さい。

インストール・ウィザードが表示されますので、指示に従ってください。

すべて**Yes**または**NEXT**を選択して先に進んで下さい。約5分程かかります。

評価版のインストールはこれで終了です。

25回までファイルの保存が可能です。それ以後は保存が出来ないだけで使用は可能です。

**注)** **Dental Shaper** は**ライノセラス 4.0 ④**の環境下で稼働しますので必ず**ライノセラス 4.0 ④**を先にインストールして下さい。

### ② Dental Shaper のインストール

¥**Dental Shaper** のフォルダー内に **DentalShaperSetup.exe** がありますので、これをクリック実行下さい。

インストール・ウィザードが表示されますので、指示に従ってください。

すべて**Yes**または**NEXT**を選択して先に進んで下さい。約3分程かかります。

インストールが完了しましたら再起動をして下さい。

以上でインストールは終了です。

### ③ 仮ライセンスの取得

デスクトップに表示されている

**ライノセラス 4.0 ④**のアイコンをクリックして下さい。

ライセンスがセットされていない場合

右記の表示があります。全英語表示の場合もあります。

「ライセンス要求書」をクリックして下さい。



INSTALLATION CODE というのは御使いの PC から発生する固有のコードです。

個人情報には抵触しませんので ご安心下さい。

必要事項を記入の上 Email か FAX にて **UIT** または **CIMSYSTEM** 社にお送りください。

3日程度で**仮使用コード**をお送りいたします。

#### ④ 仮ライセンスのセット

仮ライセンスコードが送られてきましたら、**ライノセラス 4.0**®をRUNして下さい。



コード挿入をクリックして、送られて来ました**仮使用コード**をコピー入力して下さい。

インサートを押してから終了してください。  
これで**30日間の使用が可能**になります。

(インストールした日からではなくライセンスの発行日からのカウントになります)

#### ⑤ その他

DVD中に **Shaper** 等に関する操作・説明のPDFファイル、TXTファイル等があります。ぜひ御覧下さい。  
御不明な点等御座いましたら御問合せ下さい。

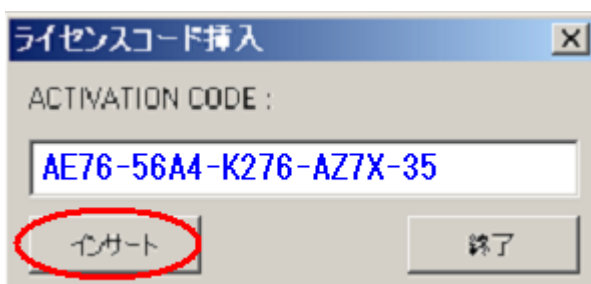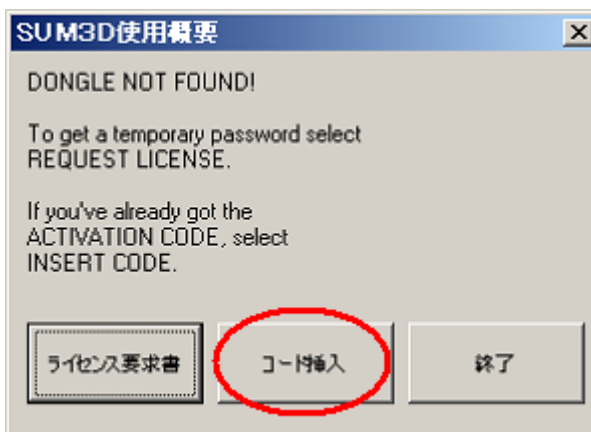

**CIMSYSTEM** 社製品 日本総代理店

**U. I. Technology Co. Ltd.**

函館本社 函館市堀川町 10-14

Tel 050-7513-2621

名古屋営業所 愛知県碧南市相生町 1-58

Tel 0566-42-4373

Email [uit@u-i-technology.com](mailto:uit@u-i-technology.com) HomePage <http://www.u-i-technology.com>